


AF ジュエットブレース 取扱説明書

胸骨・骨盤を前方から、胸腰仙部を後方から支持し、3点固定の原理で体幹の前屈を抑制する体幹装具です。
主に脊椎の圧迫骨折に対する保存療法を目的として処方されます。

『AF ジュエットブレース』は従来のジュエットブレースの適合・調整を簡易化した当社オリジナル製品です。

装着方法

- ① 胸パッド・骨盤パッドのついた本体を体の前方から当てて、手で押さえます。
 - 骨盤パッドは必ず、骨盤の骨に当たっているか確認してください。
 - 胸パッドは、喉に触れない高さで、体の左右の中心に位置するようにつけてください。
- ② 背パッドを背中に当てて、腋のベルトと、腰のベルトを締めます。
 - 背パッドは疾患部に当たる高さで、また、左右に大きくずれない位置に当ててください。
 - 上下を間違えないように確認のうえ、装着してください。

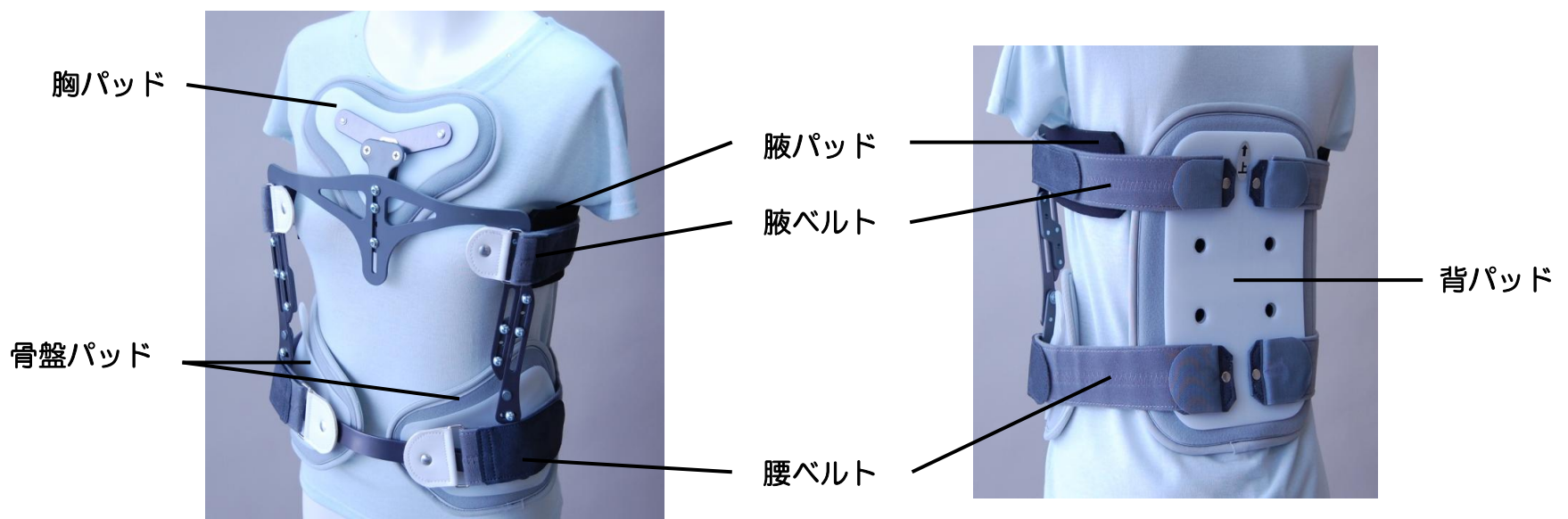

上手な使い方

- ① 装具の装着時に、腋のベルトと腰のベルトは利き手のみ着脱するようにすると付け外しが簡単です。
- ② パッドは取り外して洗濯が可能ですが、手もみ洗い・押し絞りをお願いします。

快適にご使用いただくための注意点

- フレームのねじを緩めて行う調整は技術が必要です。調整が必要な際には、必ず弊社にご連絡くださるようお願いいたします。
- ベルトの締めすぎは、特に就寝時に床ずれの原因となり得ます。十分にご注意ください。
- 適合不良や、装着の間違いなどによる不具合が、装着初期に起こる可能性が高いため、注意が必要です。
- 正しい使い方をしていても、発赤や圧迫による我慢できない痛み・傷などがあつた場合には、すぐに使用を中止し、弊社にご連絡ください。
- ご購入いただいた方への再調整料は、基本的に無料です。
- 各種制度から費用を還付してもらうためには、医師の証明が必要となります。手続き方法については、弊社担当にお問い合わせください。

※保険適用製品です。
各種保険制度の手続きをしていただくと、
保険負担率（7割～10割）に応じて保険分が還付されます。

有限会社 エムサポート

〒990-2212

山形市上柳 110

TEL 023-687-2800

FAX 023-687-2812

URL www.m-supprt.org

